

# プラチナチタン加工マスクの使用及びメンテナンス方法

## ◆プラチナチタン加工マスクは使い捨てではありません

プラチナチタン加工マスクは紫外線に当てて頂くことにより、マスク表面に付着した花粉などの有機化合物が分解除去されます。

紫外線に当てずに使用を続けると、分解した物質が吸着したままとなり、分解能力が低下して効果を感じにくくなります。

紫外線にあたることで、吸着した物質が水と二酸化炭素に分解され、マスクの有機化合物の分解力が元に戻ります。

曇りや雨の日でも分解するための紫外線量は十分にありますので、昼間に外の光が当たる窓際などに置いて頂ければ分解力が戻ります。

その為、2枚入りのマスクを毎日交互に使用することをおすすめします。

## ◆汚れが気になる場合のメンテナンス方法

口紅やファンデーションなどで内側が汚れてしまい、その汚れを落としたい場合には、ぬるま湯におしゃれ着用洗剤を入れ、やさしく手洗いして下さい。

上記の汚れ以外は、ぬるま湯で手洗いして下さい。

※ マスクを長持ちさせるには(簡単お手入れ方法)

未使用のビニール袋にマスクを入れ、ぬるま湯をマスクの倍の量入れます。

おしゃれ着洗剤をほんの少量入れ、お湯を揉む様にしてマスクになるべく

触らないようにし、お湯を捨て、ビニール袋で再度すすいで下さい。

タオルに挟んで水分を取れば、すぐに乾きます。

★ 洗濯機でマスクは洗わないでください。洗濯機で強く洗うと表面に加工したプラチナチタンが剥がれて、分解力が弱くなります。